

Contender - Armbågsortos

ART.NO 20203

Contender Armbågsortos används vid postoperativ eller posttraumatisk stabilisering av arm och armbåge för att ge kontrollerat rörelseomfång eller immobilisering. Teleskopmekanism för enkel justering av längden. Aluminium-manschetterna runt över- och underarm kan formas individuellt så risken för glidning minskar.

Manschetten som sitter över biceps/vid armbågsleden kan tas bort vilket innebär att ortosen också kan anpassas till personer med uttalad biceps/kraftiga överarmar och möjliggör större flexion utan att ta emot. Ortosen kan enkelt tas på och av med en hand med snäpplåsen.

Polstringen är mjuk och avlastande.

Extension och flexion kan justeras och fixeras från -10° - 90°. Inställningen sker i intervaller om 10°. Kontrollerat rörelseintervall från -10° - 110°. Inställningen säkras med lås-gummiband.

Indikationer: Används för post-operativ eller post-traumatisk stabilisering. Muskel/ligamentskador. Distal humerus-fraktur. Armbågsplastik. Stabil armbågsfraktur.

Storlek: Universal. Finns för höger och vänster arm. Ortosens längd 35-50cm, passar överarmsomfång upp till 56 cm, underarmsomfång upp till 46 cm.

Material: Skena: Lättviktsaluminium.
Manschett: Aluminium och nylon.
Polstring: Polyetylen och nylon.

Tvättråd: Aluminiumskenan torkas av med fuktig trasa. Polstring handtvätt i kallt vatten, plantorkas, använd ej blekmedel.

Extra tillbehör: Som extra tillbehör finns en bekväm handdel för avlastning. Positionerar och fixerar handleden i neutralposition för att undvika pro- och supination. Handdelen är utformad som en handledsortos som mjukt omsluter hand och handled. Fixeringen är mycket god och gör att oönskad muskelaktivitet kring armbågsleden minskar. Handdelen ger stabilisering för hela ortosen som gör att den sitter extra stadigt utan att glida eller rotera.

| Produkt | Sida | Art.no |
|------------------------|-----------|-------------|
| Contender Armbågsortos | Vänster | 20203-10-50 |
| Contender Armbågsortos | Höger | 20203-20-50 |
| Handdel | Vänster | 20203-15-50 |
| Handdel | Höger | 20203-25-50 |
| Polstring | Vänster | 20203-10-55 |
| Polstring | Höger | 20203-20-55 |
| Bandset | Universal | 20203-30-00 |



Avtagbar bicepsmanschett. Möjliggör större flexion utan att ta emot för personer med uttalad biceps/kraftiga överarmar.



Handdelen finns som extra tillbehör, beställs separat.



CE This product meets the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC. Class 1 medical device, non sterile.