

# HumerusComfort, HC Extend - Frakturortos

ART.NO 20220, 20224

HumerusComfort/HumerusComfort Extend är en stabil överarmsortos för frakturer på humerus. Designen är utvecklad enligt Sarmiento-principens biomekaniska krav som innebär att humerus-segment stabiliseras genom kompression av de omgivande mjukdelarna. Ger omgående smärtlindring vid applicering. Ortosen är oledad men medger rörlighet i axel och armbågsled vilket minskar risken för ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden. Den textila axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt och säkert på plats och hindrar de formgjutna plattorna från att glida. De breda cirkulära remmarna och de integrerade plattorna ger tillsammans en jämn, cirkulär kompression av mjukvävnaden runt humerus. Ortosen är lätt att applicera och justera. De integrerade formgjutna plattorna kan lätt kortas av och formas vid behov av anpassning. Ortosens textila delar är gjorda i andningsbart och hudvänligt material. Passar både höger och vänster arm. Produkten är röntgengenomsläpplig.

**Indikationer:** Ortos för diafysär humerusfraktur.

**Kontraindikationer:** Massiv mjukdelsskada. Dålig compliance. Oacceptabelt frakturläge.

**Material:** Polyester 44%, Polyamid 36%, Elastan 10%, Bomull 2%, Polypropylen 7%, Polyeten 1%. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C. Ta ur skalén och förslut kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel. Ej kemtvätt. Ej strykning. Torktumla ej.

**Måttagning:**

**1.** Överarmens omkretsmått i cm runt överarmen proximalt, högst upp vid armhålan eller där överarmen är som tjockast.

**2.** Överarmens längdmått i cm från acromion till armbågen. Mät armen med armbågsleden lätt böjd.

**Tillbehör:**

**-Axilla Kit HC, svart, art.no 20219**

Beställs separat, vid behov av individuell anpassning eller vid behov av extra inre platta för hygien/tvätt.



Reg. design by OHIM: 006260816-0001



Storlek	1. Omkrets	2. Längd	Art.no.	
S	20-27 cm	29-34 cm	20220-00-40	
S Extend		32-36 cm	20224-00-40	
M	25-32 cm	32-36 cm	20220-00-50	
M Extend		34-38 cm	20224-00-50	
L	30-40 cm	34-38 cm	20220-00-60	
L Extend		36-40 cm	20224-00-60	
XL	38-48 cm	36-40 cm	20220-00-70	
XL Extend		38-42 cm	20224-00-70	

Storlek	Längd inre skal	Art.no Axilla Kit HC:	
S	12 cm	20219-00-40	<p>Axilla Kit HC - 20219</p>
M	14 cm	20219-00-50	
L	16 cm	20219-00-60	
XL	18 cm	20219-00-70	