

Saga - Protes BH

ART.NO 31122

Bygglös bekväm protes-BH i mjukt mikrofibermaterial. Stadiga kupor med ficka för protes/vadd. Breda och polstrade justerbara axelband. Högt skuren uringning och brett stöd under armhålan ger fin passform och stöd. Hysk-hakknäppning i ryggen, 3x3 rader.

Storlek: Saga finns i storlekarna: 75 B-E, 80-105 A-E

Indikationer: Används efter olika typer av bröstkirurgi. För bröstopererad med behov av protes. Protesficka i båda kuporna. **Kontraindikationer:** Inga kända.

Material: Polyamid 85%, Elastan 15%. Latexfri

Tvättråd: Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Häng- eller plantorkas. Ej torktumling. Stäng hyskor och hakar före tvätt. Använd tvättpåse. Om blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.

Måttagning - så mäter du din storlek:

Läs tillsammans med storleksguiden nedan.

1. Stramt omkretsmått under bysten = X. Avrunda till närmsta femtal (omkrets på 78 cm ger en BH-storlek på 80).
2. Löst mått från sternum över bystens högsta punkt till mitten av ryggraden = Y. Multiplicera detta mått med 2 = Y2.
3. Skillnaden mellan Y2 och X bestämmer kupstorleken (Y2 - X = kupstorlek).



Hysk-hakknäppning i ryggen. Ficka för protes/vadd. Breda och justerbara axelband. Brett stöd under armhålan.



Storleksguide:

Omkrets under byst = X									
Omkrets X cm	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	
= Storlek	70	75	80	85	90	95	100	105	
Y2-X = Kupstorlek									
Skillnad i cm	13	15	17	19					21
Kupstorlek	A	B	C	D					E