

# Emma - Protes BH

ART.NO 31123

Bygglös bekväm protes-BH i mjukt mikrofibermaterial. Stadiga kupor med ficka för protes/vadd. Breda justerbara axelband. Högt skuren uringning och brett stöd under armhålan ger fin passform och stöd. Hysk-hakknäppning i ryggen, 3x3 rader.

**Storlek:** Emma finns i storlekarna: 70 B-D, 75-95 A-D

**Indikationer:** Används efter olika typer av bröstkirurgi. För bröstopererad med behov av protes. Protesficka i båda kuporna. **Kontraindikationer:** Inga kända.

**Material:** Polyamid 85%, Elastan 15%. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Häng- eller plantorkas. Ej torktumling. Stäng hyskor och hakar före tvätt. Använd tvättpåse. Om blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.

### Måttagning - så mäter du din storlek:

Läs tillsammans med storleksguiden nedan.

1. Stramt omkretsmått under bysten = X. Avrunda till närmsta femtal (omkrets på 78 cm ger en BH-storlek på 80).
2. Löst mått från sternum över bystens högsta punkt till mitten av ryggraden = Y. Multiplicera detta mått med 2 = Y2.
3. Skillnaden mellan Y2 och X bestämmer kupstorleken (Y2 - X = kupstorlek).



Hysk-hakknäppning i ryggen. Ficka för protes/vadd. Breda och justerbara axelband. Brett stöd under armhålan.



### Storleksguide:

Omkrets under byst = X						
Omkrets X cm	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97
= Storlek	70	75	80	85	90	95
Y2-X = Kupstorlek						
Skillnad i cm	13	15	17	19		
Kupstorlek	A	B	C	D		

