

Mirabelle - Postoperativ BH

ART.NO 31144, 31145

Stadig sömlös postoperativ BH i supermjukt material med integrerad kompression i olika zoner. Designad för att användas under rehabilitering efter bröstoperation och/eller radioterapi då kompression önskas för god läkningsprocess, för att minska risken för serom och såröppning. Helt öppningsbar för enkel applicering direkt efter operation/under läkningsprocessen.

Finns även i extra stora storlekar "Mirabelle Queen" – samma fördelar som Mirabelle men designad i extra hög/bred modell.

- Kompressionsgrad 2 - Stadig.
- Öppningsbar mitt fram med dubbelt hysk-hak, justerbar i två steg.
- Breda och reglerbara axelband framtill med hysk-hak, justerbar i flera steg.
- Dubbelt material i kupa, ficka för vadd/protes.
- Mjuk bred sömlös kant under bysten, känns behaglig mot eventuella snitt/ärrvävnad.

Indikationer: Postoperativ BH med extra stadig kompression avsedd att användas efter olika typer av bröstoperationer såsom mastektomi, lumpektomi, bröstförstoring, bröstreduktion, rekonstruktion samt vid radioterapi.

Material: Mirabelle: 91% polyamid, 9% elastan. Latexfri.
Mirabelle Queen: 94% polyamid, 6% elastan. Latexfri.

Tvättfråd: Maskintvätt 60°C. För bästa färghållbarhet rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Stryk ej. Använd gärna tvättpåse.


Storlek	Art.no Mirabelle vit	Art.no Mirabelle svart
S	31144-09-40	31144-00-40
M	31144-09-50	31144-00-50
L	31144-09-60	31144-00-60
XL	31144-09-70	31144-00-70
2XL	31144-09-80	31144-00-80

Storlek	Art.no Mirabelle Queen, vit
3XL	31145-09-90
4XL	31145-09-91

Storleksguide:

cm	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
Kupstorlek	AA													
	A	S												
	B													
	C			M	L		XL	2XL						
	D										3XL	4XL		
	E													
	F													
G														

S-2XL: MIRABELLE 3XL-4XL: MIRABELLE QUEEN

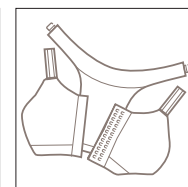

Brotтарыг och breda sidor. Helt öppen för enkel applicering, både framtill och i axelbanden. Mirabelle svart (ej Queen)

