

Holger - Handledsortos

ART.NO 40215

Elastisk handledsortos som ger ett bekvämt stöd och lindring för CMC lederna i handled och tumme. Holger är tillverkad i Oeko-tex certifierat AirX-material som ger god kompression och är bekvämt att bära. Materialet andas, är hudvänligt och torkar snabbt efter tvätt. Holger är enkel att justera samt lätt att ta på och av även med svaga händer. Fästes med kardborreband. Volar aluminiumskenan kan enkelt tas ut och formas.

Indikationer: Instabilitet i CMC led. Artros, artrit, överbelastningsskador. Även lämplig för behandling av karpaltunnelsyndrom eller vid immobilisering efter gipsbehandling.

Storlek: XS-XL, höger resp. vänster.

Material: 75% Polyester, 10% Aluminium, 5% Polyurethane, 5% Elastane, 5% Nylon.

Tvättråd: 40° maskintvätt. Använd tvättpåse. Plantorkas. Fäst kardborrebanden och ta ut skenan innan tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Håndledsmått i cm.

Storlek	Omkrets cm	Art.no Vänster	Art.no Höger
XS	11,5-13,5	40215-10-30	40215-20-30
S	14-15,5	40215-10-40	40215-20-40
M	16-19,5	40215-10-50	40215-20-50
L	20-22	40215-10-60	40215-20-60
XL	22,5-24	40215-10-70	40215-20-70




MD Class I CE

Användarinstruktion:

1. Sätt på som en handske.
2. Fäst kardborrebanden.