

Wrist-Thumb Embrace - Handledsortos m. tumme

ART.NO 40321

Stabil kombinerad tum- och handledsortos med skenor. Stängs med hjälp av tre kardborreband som omsluter handleden och ger ett extra stabilt stöd. Två uttagbara radiala tumskenor medföljer. Ortosen har en förböckad, formbar och uttagbar volar aluminiumska samt två dorosala plastskenor för extra stabilitet. Tumgreppet är justerbart med hjälp av två band som stabiliserar metakarpofalangealeden och den proximala falangen.

Indikationer: •Ligamentskada i tumme (stukningar)


- Akut eller kronisk inflammation i handleden eller mellanhandsbenen (artros)
- Tendonit och tenosynovit i tummen och handleden, och postoperativ immobilisering
- Sekundärt efter frakturbehandling av tummen eller basen av tummen
- Postoperativ immobilisering.

Kontraindikationer: •Svåra stukningar
•Omedelbar behandling efter frakturer

Material: Polyester, Spandex, Polyamid, Nylon, Aluminium.

Tvättfråd: Handtvätt rekommenderas men produkten kan tvättas i 40°C maskintvätt vid behov. Använd tvättpåse. Plantorkas. Fäst kardborrebanden och ta ut skenan innan tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Handledsmått i cm.

Storlek	Handledsmått cm	Längd cm	Art.no Vänster	Art.no Höger	
S	13-16	20	40321-10-40	40321-20-40	
M	16-18	20	40321-10-50	40321-20-50	
L	18-20	20	40321-10-60	40321-20-60	
XL	20-23	20	40321-10-70	40321-20-70	



MD Class I CE