

Form - Gördel

ART.NO 50204, 50205, 50209

Form är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och effektivt stöd/kompression över bålen. Gördeln är enkel att applicera och försluts med kardborrlåsning vilket gör det lätt att justera till önskad kompression. Kardborrlåsningen underlättar vid byte av sårforband. Patienten behöver inte lyftas upp vilket är nödvändigt vid användning av bindor. Lämplig vid sängliggande då den är mjuk i materialet och saknar sömmar/skenor bakfull. Lämpar sig även som mjuk stomi-gördel men då bör eventuellt en större storlek användas för att undvika alltför hög kompression. Form finns i beige i tre olika höjder 15, 25 och 30 cm.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Indikationer: För postoperativ vård, efter thorax och/eller bukoperationer för att avlasta sår, förhindra uppsprickning av ärr samt vid tidig mobilisering av patienten. Kan användas vid olika typer av lätta bråck. Kan även klippas i för friläggning av stomi eller öppning för drän.

Material: Polyester 77%, Naturgummilatex 17%, Polyamid 6%.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C (högre temperaturer är möjligt, men kardborrbandens livslängd förkortas). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Storlek	Mått cm	Art.no Form 15 cm	Art.no Form 25 cm	Art.no Form 30 cm
S	80-95	50209-08-40	50204-08-40	50205-08-40
M	90-105	50209-08-50	50204-08-50	50205-08-50
L	100-115	50209-08-60	50204-08-60	50205-08-60
XL	110-125	50209-08-70	50204-08-70	50205-08-70
2XL	120-135	50209-08-80	50204-08-80	50205-08-80



50205: 30 cm



50204: 25 cm



50209: 15 cm



Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

