

# StomiTube - Fixeringsgördel

ART.NO 50214

Mjuk fixeringsgördel i sömlöst, stickat material. För användning vid stomi och fixering av stomipåse. Gördeln har fickor framtill i nederkanten där tyget viks och dras över påsen/stomibandaget. StomiTube är gjord som en "tub" som man går i och ur precis som ett par vanliga trosor eller kalsonger. Bra passform för olika figurtyper då formen är smalare bak i ryggen. Syns inte under kläderna, är enkel att använda och trygg att bära. Gördeln gömmer och håller påsen på plats samtidigt som den döljer/minskar eventuella ljud. Kan användas varje dag, natt samt vid olika sportaktiviteter. Vanliga trosor eller kalsonger kan bäras under eller utanpå gördeln. Passar för stomi på höger eller vänster sida. StomiTube finns i 3-pack i svart eller beige. Höjd fram 18 cm, höjd bak 11 cm.

**Indikationer:** Används vid stomi för fixering av stomibandage. **Kontraindikationer:** Stomibråck.

**Material:** 90% Polyester, 10% Elastan. Latexfri.

**Tvåttråd:** 60°C maskintvätt. För bästa hållbarhet rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme. Stryk ej. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt.

**Måttagning:** För rätt storlek, ta höftmättet över det bredaste stället.

Storlek	Höftmått cm	Art.no StomiTube, svart, 3-pack	Art.no StomiTube, beige, 3-pack
XS/S	65 - 90	50214-80-30	50214-88-30
S/M	85 - 110	50214-80-40	50214-88-40
M/L	105 - 125	50214-80-50	50214-88-50
L/XL	120 - 140	50214-80-60	50214-88-60

