

StomiSoft - Stomigördel

ART.NO 50218, 50219

StomiSoft är en rak, elastisk stomigördel som ger ett bekvämt stöd vid stomi eller stomibråck. Gördeln har en oelastisk front som ger stabilitet. Enkel att försluta och justera med handtag och kardborrefäste i fronten. Då kardborren fäster över hela den oelastiska fronten är gördeln flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras för mer eller mindre tryck.

Möjligt att klippa hål i det stadiga men mjuka oelastiska frontpartiet. Hål klippas i önskad storlek anpassat efter stomibandaget/drän. Frontpartiet fransar sig inte oavsett form och storlek på hålet, ingen sömnad behövs. Gördeln går lika bra att använda med eller utan klippt hål. Önskas mer tryck över stomipåsen försluts gördeln så att påsen ligger under det oelastiska materialet. För att stomipåsen ska kunna expandera lätt kan gördeln vändas så att påsen istället ligger under det elastiska materialet.

Gördeln är vändbar för att passa för stomi både på höger och vänster sida. Finns i svart, höjd 16 och 20 cm.


Indikationer: Stabiliserande gördel vid stomi/lättare typer av stomibråck. Preventivt mot bråck. Gördel för buk/bål vid mobilisering efter kirurgi. Används utanpå stomipåse eller med hål för stomipåse. Lämplig som permanent gördel. **Kontraindikation:** Inklämda bråck.

Material: Polyester 49%, Polyamid 29%, Polyuretan 11%, Elastan 11%. Latexfri.


Tvättråd: Maskintvätt 40° C. Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.


| Storlek | Mått cm | Höjd 16 cm Art.no | Höjd 20 cm Art.no |
|---------|---------|----------------------|----------------------|
| XS | 70-85 | 50219-00-30 | 50218-00-30 |
| S | 80-95 | 50219-00-40 | 50218-00-40 |
| M | 90-105 | 50219-00-50 | 50218-00-50 |
| L | 100-115 | 50219-00-60 | 50218-00-60 |
| XL | 110-125 | 50219-00-70 | 50218-00-70 |
| 2XL | 120-135 | 50219-00-80 | 50218-00-80 |

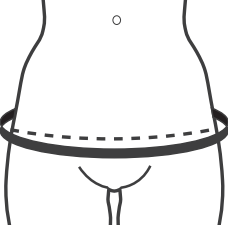



Handtag för enkel på- & avtagning.

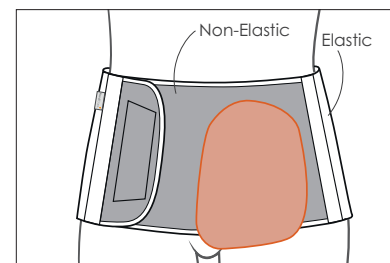

Med klippt hål för stomibandage.

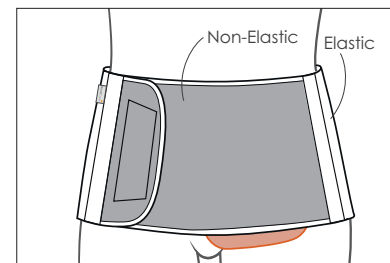

Med mer tryck, oelastiskt stöd/
support över stomibandaget.

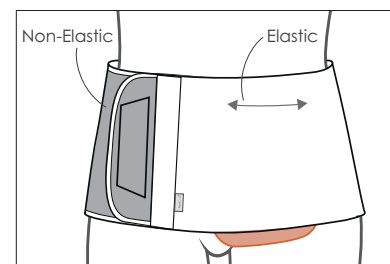

Med mjukt, elastiskt stöd/support
över stomibandaget.

