

AbdoBas - Gördel

ART.NO 50236

Elastisk gördel för effektiv avlastning och kompression. Enkel att applicera och använda direkt efter operation. Gördeln har en oelastisk front i stabiliserande foam-material som avlastar och ger stöd. Enkel att försluta och justera med handtag och kardborrefäste i fronten. Handtaget har en färgmarkering som tydligt och direkt indikerar storleken på produkten.

Möjligt att klippa hål i frontpartiet, hål klippis i önskad storlek anpassat efter stomi eller drän. Foam-materialet fransar sig inte oavsett form eller storlek på hålet, ingen sömnad behövs.

Gördeln är vändbar, anpassad för att kunna förslutas både på höger eller vänster sida. Höjd bak 25 cm, höjd fram 28 cm, färg vit.

Indikationer: Postoperativ gördel efter bukkirurgi. Stabiliserar bukväggen vid bräck/stomi. Preventivt mot bräck.

Kontraindikationer: Inga kända.

Material: 37% Bomull, 20% Polyester, 19% Polyester-Foam, 15% Spandex, 9% Nylon. Latexfri.

Tvättfråd: Kan tvättas i 95°C ca 10 gånger, produktens livslängd förlängs vid tvätt i 40-60°. Förslut kardborrefästet innan tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt tänkt placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.

Storlek	Mått (cm)	Färg	Art.no
XS	60-75	orange	50236-09-30
S	70-85	svart	50236-09-40
M	80-100	gul	50236-09-50
L	95-115	grön	50236-09-60
XL	110-125	röd	50236-09-70
2XL	120-135	blå	50236-09-80
3XL	130-145	lila	50236-09-90


