

Multi - Ryggortos

ART.NO 50240

Multi är en formbar korsett som ger ett bekvämt stöd och trygg kompression. Den går att anpassa till flera behov och figurtyper, såväl dam som herr. Multi går att positionera lågt ner över höften/bäckenet, eller högre upp i midjehöjd. Multi har bred kardborrlåsning framtill för att passa både över höft och i midjehöjd. Elastiska justerbara drag-band går att reglera till ökad stabilitet och stöd. Stabilit/oelastiskt material fram gör att den lämpar sig utmärkt som stöd och stabilitet abdominalt. Tunt, flexibelt material i sidorna gör att Multi kan anpassas efter olika figurtyper. Plastfjädrar och stadigt material i ryggpartiet gör korsetten stabil. Den kan vändas så att både höger respektive vänsterknäppning är möjlig. Färg svart.

Indikationer: Multi används vid ryggskott, ischias samt övriga vanliga besvär i ländryggen. Multi passar även utmärkt att använda som stöd för höft/bäcken vid SI-besvär. Även lämplig för personer med bråck. Det oelastiska materialet i frampartiet ger kompression mot mjukdelarna och håller in bråcket.

Material: Polyester 42%, Polyamid 40%, Elastik 13%, Polyuretan 5%.

Tvåfråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Höftmått i cm. Om ortosen avses att användas i midjehöjd, utgå då från midjemått i stället för höftmått.

Storlek	Mått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Small	80-95	50240-00-40	18 cm	21 cm
Medium	90-105	50240-00-50		
Large	105-115	50240-00-60		
X Large	115-125	50240-00-70		
2X Large	125-135	50240-00-80		



CE This product meets the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC. Class 1 medical device, non sterile.