
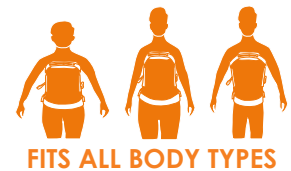


e-STAB - 3-punktkorsett

ART.NO 50375

3-punktsortos som används för att begränsa/kontrollera flexion och sidorörlighet i den thoracolumbala delen av ryggraden. e-Stab anpassar sig till olika kroppstyper, som en skraddarsydd produkt fast med ett reducerat antal storlekar. Den nedre bygel är teleskopisk justerbar i bredd, kan formas och är låsbar i 0°, 18°, 36°. Den övre bygel går att justera i vidd och går även att ställas i olika vinklar för att uppnå bästa passform över bröstkorgen vid olika grader lordos. Produkten är teleskopiskt justerbar i höjd. Alla justeringar fillåts utan att behöva ta bort skruvarna, endast genom att lossa dem. Ramen är gjord av en lätt aluminiumlegering med avfasade kanter. Polstringen är värmelaminerad, helt utan sömmar och limning. Polstringen kan anpassas genom att klippas i skärlinjerna och fästs på ortosen med tryckknappar. Polstringen har en vattenavvisande yta. När ortosen är anpassad kan den enkelt tas av och på med hjälp av sidospännet. Spännet är av säkerhetsskäl fjäderbelastat i sitt låsta läge.

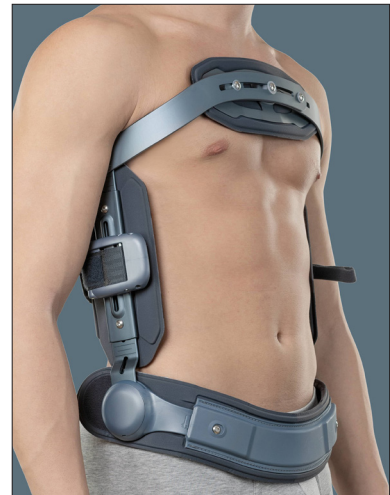

Indikationer:

- Frakturer (T10-L1/L2)
- Osteoporotisk eller metastatisk relaterade kompressionsfrakturer i bröstryggen eller dorsolumbart (T10-L1/L2)
- Osteomalaci med frakturer
- Dorsolumbar artros
- Alternativ för gipskorsett

Kontraindikationer: Inga kända.

Material: En lätt ram i aluminiumlegering. Plastdelar i TPC-ET. Snäppspänne i polykarbonat. Polstring i PE-skum. Bälte i polyester. Latexfri.

Tvättråd: Ram torkas av med mjuk fuktig trasa. Polstring handtvättas försiktigt i max 30°C.

Måttagning: Höftmått i cm. Höjdmått i cm - Mät från den proximala delen av bröstbenet (corpus sterni) till den övre delen av blygdbenet (tuberculum pubicum).

Storlek	Höftmått i cm (1)	Höjd i cm (2)	Art.no
1	50-75	41-54	50375-00-40
1 Short		30-41	50375-50-40
2	75-105	41-54	50375-00-50
2 Short		30-41	50375-50-50
3	105-135	41-54	50375-00-60
3 Short		30-41	50375-50-60