

Daisy - Kompressionsbody

ART.NO 51204

Kompressionsbody i stickat sömlöst material med dubbelt material över buken. Rekommenderas efter ingrepp på buk såsom fettsugning eller bukplastik. Bodyn är helt öppningsbar och lätt att ta på direkt efter operation. Hysk- och hakknäppning i båda sidor för enkel av- och påtagning och justering av passform. Grenen är öppningsbar med hysk- och hakknäppning, möjliggör toalettbesök utan att plagget tas av. Linning med silikonkant för att bodyn bekvämt ska sitta på plats. Det dubbla materialet över buken bildar en ficka där eventuellt pelott/foam material kan läggas in för att ge extra tryck. Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i stuss- och ryggparti.

Indikationer: Kompressionsplagg efter plastikkirurgi. Motsvarande kompressionsklass 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos.

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.

Måttagning: För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama.


Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.

Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över pubis, där höft/stuss är som bredast.

Storlek	Midjemått cm	Höftmått cm	Art.no Svart	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	51204-00-30	51204-08-30
S	69-75	92-97	51204-00-40	51204-08-40
M	76-83	98-103	51204-00-50	51204-08-50
L	84-92	104-111	51204-00-60	51204-08-60
XL	93-101	112-119	51204-00-70	51204-08-70
2XL	102-110	120-127	51204-00-80	51204-08-80



Hysk- och haköppning i båda sidorna och i grenen samt silikon i linningen.

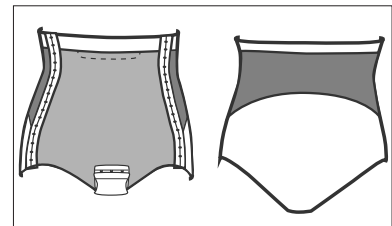

Seamless



4-way stretch



Compression class I



Fully openable & Adjustable



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com

