

ImmoKid - Immobiliseringsortos

ART.NO 70510

ImmoKid är en barnortos och används vid immobilisering av knäleden.

Två anatomiskt formade aluminiumskenor baktill ger bra komfort och passform. De laterala skenorna fäster med kardborre och kan flyttas för individuell anpassning, skenorna skall sitta centrerat medialt/lateralt vid knät och i femurs längsriktning. Samtliga skenor kan bockas/formas. Ortosen fixeras med hjälp av tre elastiska band med kardborre. Det går bra att klippa i materialet och på så sätt minska omkretsen ytterligare så ortosen passar mycket små knän/ben.



Indikationer: För immobilisering av knäleden efter operation eller trauma.

Kontraindikationer: Inga kända.

Storlek: 2XS-S

Material: 50% Neopren, 25% Nylon, 10% EVA Laminat, 5% Delrin, 5% Elastik, 5% Stretch UBL. Aluminiumskenor. Latexfri.

Tvättråd: Handtvätt max 30°C. Använd tvättpåse. Plantorkas. Fäst kardborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omkrets lår, mät 10 cm ovanför knä, från patellas centrum.



	Storlek	Ortosens längd cm	Omkrets cm (passar upp till)	Art.no	
Child	2XS	15	28	70510-00-20	
	XS	23	35,5	70510-00-30	
	S	27	35,5	70510-00-40	