

NeoROM - Stabiliserande knäortos

ART.NO 70526

Ett anatomiskt stabiliserande knäskydd i öppen omlottmodell. Ortosen har skenor med inställbar flexion/extensionstopp, ROM, individuell inställning av hyperextensionsstopp. Ledjusteringen görs med en pin som sedan förankras med ett plastlock. Extension och flexion kan justeras och låsas i 0°, 10°, 20°, 40°, 60° och 90° samt fri rörlighet i flexion. Skenorna kan enkelt tas ut ur fickan för att justeras/bockas. Skyddet är tillverkat av neopren, ett material med goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. Kardborrband gör det enkelt att anpassa och justera skyddet. Denna ortos finns i extra stora storlekar, 2XL-4XL. Ortosen är 40 cm lång.



Indikationer: Stabilisering av knäled, posttraumatiskt och postoperativ. Begränsning av hyperextension.

Kontraindikationer: Inga kända.

Storlek: S-4XL Universal höger/vänster.
2XL-4XL: King-size.

Material: Latexfri Neopren, Aluminium, Nylon, Stål.

Tvättråd: Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst kardborrbanden och ta ut skenorna vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.



MD Class I CE

Måttagning:

1. Omkrets lår i cm (ca 15 cm ovanför mitt-patellan).
2. Omkrets runt knä över mitt-patella.
3. Omkrets vad i cm (ca 15 cm nedanför mitt-patellan).

Storlek	1. Omkrets lår cm	2. Omkrets mitt-patella cm	3. Omkrets vad cm	Art.no
S	40,5-46	30,5-35,5	28-33	70526-00-40
M	46-48,5	35,5-40,5	33-38	70526-00-50
L	48,5-53,5	40,5-46	38-43	70526-00-60
XL	53,5-58,5	46-51	43-48,5	70526-00-70
King-size	2XL	58,5-63,5	48,5-53,5	70526-00-80
	3XL	63,5-68,5	53,5-56	70526-00-90
	4XL	68,5-71	61-66	70526-00-91