

# TopScore ROM - Post-op knäortos

ART.NO 70645

Postoperativ knäortos används som stabiliserande eller immobiliserande ortos efter skada eller operation av knäleden för kontroll av flexion/extension samt medial/lateral stabilitet. Utvecklad för att möjliggöra snabb och enkel utprovning efter skada/operation.

Insidan av ortosen är försedd med mjuk polstring, som med god friktion greppar tag om benet och gör att ortosen sitter på plats. Klippbara band med snäpplås gör utprovning samt påtagningen för patienten enkel. Skenorna kan skränkas för att individuellt anpassas efter varje patient.

Med teleskopmekanismen kan ortosens längd justeras, från 50 cm till 63 cm. Extension och Flexion kan justeras och låsas från 0° till 45° i intervaller om 10°/15°. Kontrollerat rörelseomfång mellan 0° till 120° bestäms enkelt med tryckknapp i intervall om 10°/15°. Inställningen kan säkras med medföljande buntband.

**Indikationer:** Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk stabilisering. För kontroll av rörelseintervall efter operation av ACL, PCL, MCL och LCC, menisk, patella, artros, stabil femurkondylfraktur, total knäplastik och tibiakondyl-fraktur.


OBS! Skall endast användas efter medicinskt utbildad persons utprovning och rekommendation om användning.

**Storlek:** Universal storlek.

**Material:** Aluminium, Foam, Velcro. Latexfri.

**Tvättråd:** Textil polstring - Fintvätt 30° C. För bästa hållbarhet rekommenderas handtvätt, plantorkas. Skenorna och leden - tvättas av med trasa och varmt vatten/milt desinfektionsmedel.

Storlek	Art.no
Universal	70645-00-50
Tillbehör	Art.no
Polstring	70645-00-55
Band	70645-00-65

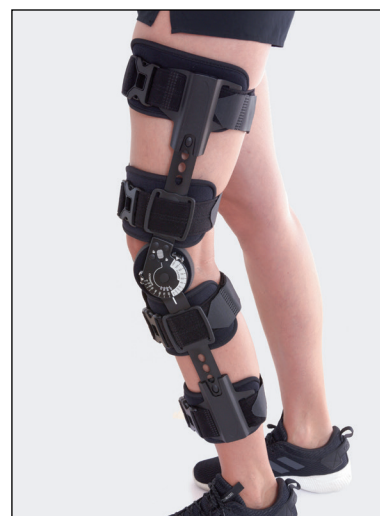

Med teleskopmekanismen kan ortosens längd justeras, från 50 cm till 63 cm.



Extension och Flexion kan justeras och låsas från 0° till 45° i intervaller om 10°/15°. Kontrollerat rörelseomfång mellan 0° till 120° bestäms enkelt med tryckknapp i intervall om 10°/15°.

