

Arcus - Kontraktur-hälsår-AFO

ART.NO 80436

Arcus är framtagen för att preventivt avlasta häl eller avlasta redan uppkomna hälsår från tryck vid sängläge. Arcus förebygger kontraktur i fotled. Ortosen fixerar foten i neutralläge vid sängläge samt bibehåller dorsalflexion vid förflyttning.

Ortosen är försedd med ett anti-rotationsstag som motverkar inåt- och utåtrotation i knä- och höftled vid sängliggande. Ortosen är fodrad med mjukt, avtagbart polstringsmaterial som är öppningsbart över hälen. Häldelen är tillverkad i genomskinlig plast vilket innebär att ortosen ej behöver tas av för inspektion av hud eller sår. Med reglerbara kardborrband i var sida kan graden av dorsalflexion fixeras/ökas.

Arcus kan behållas på om patienten kort behöver förflytta sig då gummisulan ger ett bra fäste. Tådelen i 15 graders vinkel ger god stabilitet för framfoten vid förflyttning, justerbar till större skostorlek. Fotplattan kan tas av, enkel applicering med hjälp av kardborrband.

Storlek: Två storlekar som passar höger/vänster.

Indikationer: För avlastning/prevention av hälsår vid sängläge. Förebygger kontraktur i fotled. Motverkar rotation i höftled. **Kontraindikationer:** Instabil fraktur i fotled. Iaktta försiktighet vid nedsatt sensibilitet i fot. **Risker:** Ej avsedd för gång. Klarar belastning vid kortare förflyttningar.

Material: Plastskena: 100% Polypropen.
Polstring: 100% Polyurethan (PU) foam med polyesterbeläggning 100% Polyester.
Kardborrband: 100% Polyester.
Latexfri.

Tvättråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstringen maskintvättas i 40°C och mildt tvättmedel. Plantorkas på behörigt avstånd från värmekällor.

Måttagning: Omkretsmått vaden i centimeter.

Tillbehör:

Extra polstring S/M: 80437-51-40
Extra polstring L/XL: 80437-51-60

Storlek	Omkrets vad	Skostorlek	Art.no
S/M	upp till 42 cm	36-46	80436-51-40
L/XL	upp till 48 cm	36-46	80436-51-60

