


Alternativ 1 - dubbel armslinga

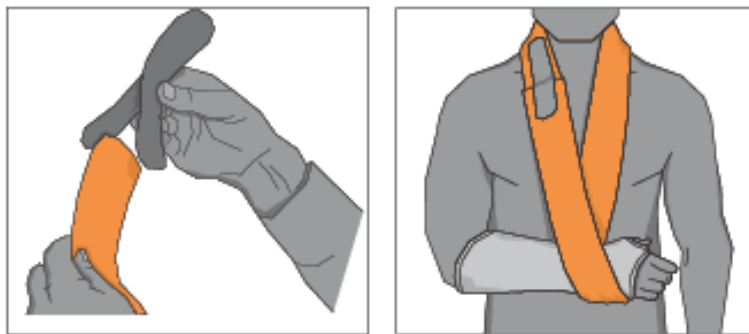

Alternativ 2 - enkel armslinga

Quicksling Armslinga Arnr 201180050

Indikationer: För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma.

Instruktion till användaren

Alternativ 1, dubbel armslinga

1. Klipp till önskad längd.
2. Fäst kardborre i båda ändarna på bandet.
3. Gör en ögla för applicering nära armbågen.
4. För slingan bakom ryggen över motsatt axel.
5. Linda slingan runt handleden och justera handens läge genom att fästa kardborren mot slingan.

Alternativ 2, enkel armslinga

1. Klipp till önskad längd.
2. Fäst kardborre i ena ändarna på bandet.
3. För slingan runt nacken.
4. Fäst kardborrbandet.

Material:

53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon.
Latexfri.



Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/CEE. Medicinteknisk produkt klass 1, icke steril.

Tillverkad av:
NordiCare AB
Hamnplanen 24
SE 260 40 Viken



NordiCare⁺