



## AXEL™ skulderortos art nr 20200 Universal vänster/höger

AXEL skulderortos avlastar effektivt axelleden utan att belasta nacke-/skulderparti. Bygeln flyttar belastningen från muskel-/nervvävnad till bröstorg/skelett. AXEL är lätt att applicera och justera. Två storlekar täcker bröstorgsomfång från 65–120 cm. Patienten kan enkelt ta av och på ortosen med en hand. Passar såväl höger som vänster sida. Kan användas i kombination med annan armslinga.



### Utprovarinstruktion

1. Placera bygeln över lämplig sida, bild A. Bröstplattan skall vila på bröstbenet, bild B. Den bakre delen av bygeln skall vila mellan skulderbladen, bild C.
2. Justera vidden, och därmed höjden över axeln, på bygeln genom att flytta den löstagbara låsklacken till lämpligt trappsteg på bröstplattan, bild D. Bygeln skall aldrig vila på axeln utan hamna strax ovanför axeln i belastat läge.
3. Trä i armen och justera handledsremmen till lämplig höjd.
4. Vid behov kan AXEL kombineras med annan armslinga för önskat stöd och avlastning för arm/hand. Ta bort handledsremmen och ersätt med kompletterande armslinga. Armslingans axelband träs genom bakre slitsen, över bygeln och genom främre slitsen på AXEL.

### Användarinformation

1. Trä i armen i handledsdelen.
2. Placera bygeln över lämplig sida, bild A. Bröstplattan skall vila på bröstbenet, bild B. Den bakre delen av bygeln skall vila mellan skulderbladen, bild C. Bygeln skall aldrig vila på axeln utan hamna strax ovanför axeln i belastat läge.

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av utbildad sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användningsinstruktionerna. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel. Ortosen är avsedd att användas till en patient. Återanvänd den ej till flera patienter.

Storlek:	Omkrets bröstorg (cm)
Small/Medium	65-100
Large/X-Large	90-120

### Måttagning

Omfångsmått bröstorg under armhålan.

### Tvättråd

Rengöres med mjuk fuktig trasa och mildt diskmedel.

Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/CEE. Medicinteknisk produkt klass 1, icke steril.

Tillverkad av:  
Allofit AB  
Neptunivägen 6A  
SE 23735 Bjärred



Swedish Pat Nr SE 529 390 C2  
Pat Pend. PCT/SE2006/001344

NordiCare<sup>+</sup>