

Appliceringsguide Stratus Airwalker



1. Ta ur och fäst polstringen tight men bekvämt kring underben och fot. Använd strumpa. Den medföljande extra polstringen kan användas som utfyllnad/vaddering.

2. Vårdgivaren bedömer om det finns behov av kilar och vinkeln på kilarna.



3. Sätt den polstrade foten i walkern med hälen så långt bak som möjligt. Placera därefter frontpanelen.



4. Fäst och dra åt banden. Börja med ankelremmen, därefter fotremmen och sist vadremmen.



5. Pumpa upp luftcellerna med de blå pumparna. Pumpa båda samtidigt för att säkerställa att foten centreras i walkern och får behagligt stöd.



6. För att släppa ut luft, håll inne den svarta ventilen.