

# SmartCuff axellås, appliceringsguide


## Avtagning



Lossa axelbandet och fäst kardborren.



Lossa handledsbandet.

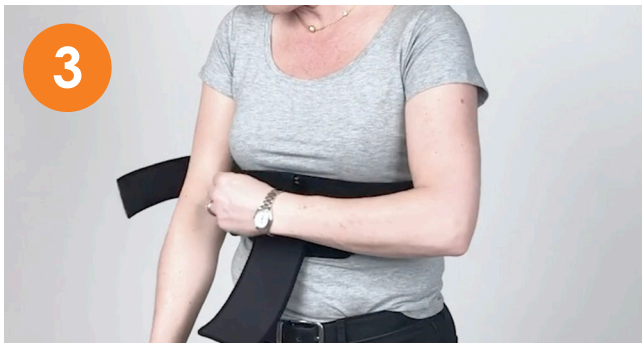

Lossa överarmsbandet.



Lossa bålbandet.

## Påtagning



Fäst bålbandet.



Fäst överarmsbandet.



Fäst handledsbandet i undre D-ringen.



Fäst axelbandet.



Scanna för att  
se instruktionsfilm

**NordiCare** <sup>+</sup>

Tel 042-35 22 20, info@nordicare.se, www.nordicare.se