

## TK ROM knäortos, appliceringsguide



Börja med att positionera ortosen runt benet liggande, för att kontrollera passformen.



Justera längden på skenorna med hjälp av teleskopmekanismen. Se till att skenorna blir lika långa på båda sidorna. Bocka skenorna vid behov, så att de följer benets kontur.



Forma aluminiummanchetterna efter benet för att ge perfekt passform.



Justera rörelseintervallet från 0°-90° extension och 0°-120° flexion. De mediala och laterala lederna måste ha samma rörelseomfång. Medföljande buntband kan säkra inställningen.



Förslut kardborrbanden, börja med banden närmast knäleden (1). De två lederna för kontroll av flexion/extension ska vara i höjd med knäleden.

