

AbdoCare - Gördel

ART.NO 50225, 50226

AbdoCare är en medicinsk-kirurgisk elastisk gördel som ger smärtlindring och effektivt stöd/kompression över bålen och möjliggör en tidig mobilisering efter operation. Gördeln är enkel att anpassa och applicera direkt efter operation. Storleken/kompressionsgraden/formen kan enkelt justeras då kardborren kan fästas över hela gördelns yta. AbdoCare finns i två olika höjder och i storlekar med stort intervall. En storlek kan användas som universalstorlek och förenklar därmed lagerhållning. Gördeln kan också göras lägre genom att klippa av en höjdnivå. Vid behandling av stomibråck går det att klippa i hål i AbdoCare för att frilägga stomin.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Modell	Art. no	Höjd
AbdoCare 23 cm	50225	23 cm
AbdoCare 30 cm	50226	30 cm

Indikationer:

För postoperativ vård, efter thorax och/eller bukoperationer för att avlasta sår, minska risken för serom/infektioner/bråckbildning, förhindra uppsprickning av ärr samt vid tidig mobilisering av patienten. Rekommenderas för olika typer av lätta bråck samt vid tillverkning av stomigördel.

Material:

AbdoCare: Polyester 65%, Nylon 19%, Spandex 16%. Latexfri.

Tvättråd:

Maskintvätt 40-60°. Kan tvättas i upp till 95° ca 10 gånger (produktens livslängd förkortas vid tvätt i 95°). Förslut kardborrband. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Kemtvätta ej. Ej strykning. Torktumla ej.

Måttagning:

Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.



50225: 23 cm hög



50226: 30 cm hög

Storlek	Mått cm
1	75-115
2	110-155
3	150-190



CE This product meets the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC. Class 1 medical device, non sterile.