

SafeHip® Classic - Höftskyddsbyxa

ART.NO 60300, 60304, 60307

Höftskyddsbyxa med mjuka, patenterade, hästskoformade foamskydd. Finns i unisexmodell samt med öppen gren. Kan användas istället för underbyxor alternativt som överdragsbyxa. Safehip® Open kan användas med stora inkontinensskydd. Båda modellerna är luftiga och sköna att bära. Safehip® Classic finns i olika modeller med fastsydda eller urtagbara skydd.

Modell	Art.no	Skydd	Förp.
SafeHip® Classic Unisex	60300	fastsydda	1 st
SafeHip® Classic Open	60304	fastsydda	1 st
SafeHip® Classic Unisex	60307	urtagbara	3 st

Indikationer:

Safehip® används för att förebygga höftfraktur hos personer som lider av benskörhet (osteoporos), som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan fraktur, har svimningstendens/yrsel, falltendens eller gångbesvär. Safehip® höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och testade i flera undersökningar. Danska studier¹ visar att Safehip kan reducera antalet höftfrakturer med upp till 75%. Samtidigt känner sig användarna tryggare och mer rörliga i sin vardag.

Material:

Bomull 71%, Polyester 25%, Elastan 4%. Latexfri.

Tvättråd:

Safehip® höftskyddsbyxa tvättas i maskin vid 60°. Torktumla vid låg temperatur. Använd ej klorblekmedel. Byxans livslängd förlängs ifall byxan vänds ut och in vid tvätt. Använd gärna tvättpåse.

Måttagning:

Höftmättet skall tas över stussen på bredaste stället, centimetermätt.

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119



60300: Safehip® Classic Unisex



60304: Safehip® Classic Open

Storlek	Höftmått cm
X Small	65-85
Small	75-95
Medium	90-110
Large	100-120
X Large	110-140
2X Large	120-150 (ej Open)

