



Bure Låg art nr 50241 – Bure Hög art nr 50242

Elastisk och funktionell ryggortos som ger god stabilitet och bekvämt stöd över ländryggen. Passar de flesta figurtyper, både dam och herr. Bure fästs med kardborrlåsning fram. De breda, elastiska dragbanden är reglerbara och även de fästs mitt fram med kardborre. De två urtagbara ryggskenorna kan formas efter ryggens kontur.

Bure används vid ryggskott, ischias samt övriga vanligt förekommande besvär i ländryggen.

Instruktion till utprovaren/användaren

1. Sätt gördeln på plats och fäst kardborrlåsningen över magen.
2. Justera så det känns bekvämt.
3. Drag åt banden till önskat stöd och fäst dem mitt fram.
4. Spänn inte dragbanden för hårt. Tag av gördeln ifall det svider, skaver eller färgförändringar uppstår i huden. Kontakta utprovaren.
5. Forma ryggskenorna efter ryggens kontur.
6. För ytterligare information eller andra frågor, kontakta utprovaren.

Föreskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av ortopedingenjör/tekniker eller annan sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användningsinstruktionerna. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel.

Tvättråd

Maskintvätt 40°. Tag ur ryggskenorna och förslut alla kardborrband före tvätt.

Använd ej blekmedel. Ej strykning. Torktumla ej. Plantorkas.

Använd gärna tvättpåse.



Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/CEE. Medicinteknisk produkt klass 1, icke steril.

Tillverkad av:
NordiCare AB
Hamnplanen 24
SE 260 40 Viken



NordiCare⁺